

## Filmul Mamografic Kodak MIN-R S

Filmul Mamografic Kodak Min-R S, in cele mai multe cazuri, nu necesita schimbari ale echipamentului sau ale procedurii. Este compatibil cu toate ecranele Kodak MIN-R, acest film:

- Asigura o viteza de 100 cu ecranele MIN-R si viteza de 150cu ecrane MIN-R 2000.
- Oferă rezultate bune, cu rezervoarele cu reumplere cat si cu alte echipamente de procesare.
- Este compatibil cu Developer si Fixator Kodak, atat pentru procesarea manuala cat si automata, mentinand densitatea necesare unei imagini calitative.
- Oferă rezultate optime cand este folosit cu intreaga gama de sisteme Kodak, inclusiv solutiile de procesare, ecrane, casete si procesoare.

Imaginilor neclare si intunecate sunt imbunatatite si informatia de diagnosticare este marita. Rezolutie ridicata ofera o perceptie a microcalcificatiilor si a altor detalii.

Filmul Kodak MIN-R S este un film de viteza medie, cu invelis dublu, orto-sensibil pentru mamografie, cu ecrane cu emisie verde. Este asezat pe o baza support albastra ESTAR 7-mil, cu densitatea de baza de aproximativ 0.19. Filmul Kodak MIN-R S ofera contrastul ridicat, necesar observarii tesutului mamar. Acest film poate fi folosit deasemenea pentru radiografierea extremitatilor; este proiectat pentru cicluri standard de procesare. Deasemenea ofera contrast ridicat cu sensibilitate scazuta, in conditii de procesare variate.

Filmul de raze X este foarte sensibil la manevrarea artefactelor. Mainile trebuie sa fie curate, uscate si fara lotiuni. Filmul trebuie manevrat cu atentie, apucat demargini pentru a se evita eforturile ca presiune, cutele si bucelele.